


 **FRIGO**
wellion **MED COOLER BAG**



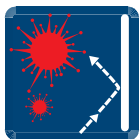

Wellion® FRIGO představuje jednoduchý, rychlý a pohodlný způsob chlazení vašeho inzulínu, inzulínové pumpy či jiných medikamentů. Není třeba ani elektřiny, ani zamrazení, či zchlazení. Pouzdro **Wellion® FRIGO** aktivujete jednoduše studenou vodou. Neustále dokola.

Aby byla zajištěna trvalá kvalita a hygiena při častém používání pouzdra, je vnitřní část pouzdra opatřena **antibakteriální impregnací**. Je to výhoda navíc, která je při manipulaci s inzulínem a léčivou velmi důležitá.

Obsahuje:

Každé chladičí pouzdro se skládá z:

1. Vnější kapsy **Wellion® FRIGO**
2. Vnitřní kapsy **Wellion® FRIGO** naplněné krystalky

Návod k použití:

1. Protřepejte vnitřní kapsu pouzdra **Wellion® FRIGO**, aby se krystalky rovnoměrně rozprostřely.
2. Na několik minut ponořte vnitřní kapsu pouzdra **Wellion® FRIGO** do studené vody (**Wellion® FRIGO** L na 10 minut, **Wellion® FRIGO** XXL na 12 minut).
3. Během této doby vytvoří krystalky v chladičích žebrech gelovou hmotu a tato kapsa se zvětší.
4. Poté je třeba vnitřní kapsu pouzdra vysušit hadříkem, aby se odstranila přebytečná voda.
5. Zchlazený inzulín vložte do vnitřní kapsy pouzdra **Wellion® FRIGO** – pak vložte naplněnou vnitřní kapsu pouzdra do vnější kapsy **Wellion® FRIGO**.

Trvalé používání a uchování:

Ponořte chladičí pouzdro **Wellion® FRIGO** do studené vody až tehdy, když se gel opět přeměnil na krystalky. Používáte-li pouzdro neustále, je doba ponoření do vody kratší.

Nenechávejte vaše pouzdro **Wellion® FRIGO** déle jak 24 hodin v neprodyšném zavazadle (batoh, kufr apod.). Funkce pouzdra je založena na odpařování, a proto pouzdro potřebuje kolem sebe proudící vzduch.

Pokud pouzdro nepoužíváte, oddělte vnitřní kapsu pouzdra od vnější kapsy, aby mohly obě kapsy řádně oschnout. Během sušení kapsu protřepejte. Tím zajistíte, že se krystalky neslepí dohromady.

Helpline: 800 244 555